

ALKAWEAR OKŁAD NA WĄTROBĘ ROZMIAR 1 (S)



cena: 259,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria	wyrób medyczny
Producent	P.Jentschura
Wysyłka	1-3 dni, 24 godziny

Opis produktu

Zasadowy okład wątroby można stosować z powodzeniem podczas kuracji oczyszczających i regenerujących. Przynosi on ulgę i odciąża także przy bólach brzucha, bólach menstruacyjnych i napięciu mięśni pleców. Okład może być noszony pod ubraniem. Można stosować w trakcie dnia i w nocy. Okład oraz pas są wykonane w 100% z bawełny.

Sposób użycia:

1. Dokładnie rozpuścić łyżeczkę soli mineralno-zasadowej MeineBase w około 1/2 l wody o temperaturze ciała.
2. Zamoczyć w roztworze okład, następnie dokładnie wykręcić, by nie kapała woda.
3. Okład należy umieścić w wolnej przestrzeni w pasie, a następnie obwinąć pas wokół tułowia i wyregulować zacisk wstążkami.
4. Okład należy wyprać po każdym użyciu.

Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.