

## Defibrylator AED-Fred PA-1 Schiller

cena: 5 299,00 PLN




### Opis słownikowy

Kategoria	Sprzęt medyczny
Producent	Schiller
Wysyłka	1-2 dni
Zastosowanie	Bezpieczna defibrylacja

### Opis produktu

[Sprawdź ofertę promocyjną na Defibrylatory AED >](#)

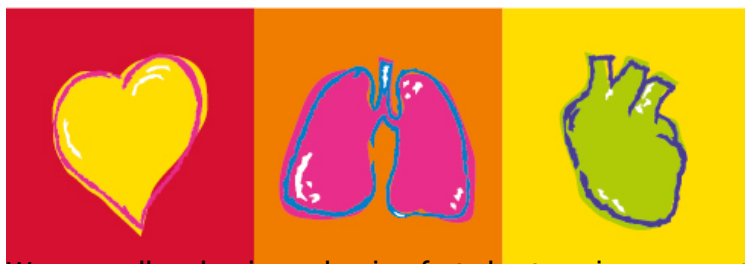

**SCHILLER**  
The Art of Diagnostics

W przypadku chęci uzyskania oferty hurtowej na prezentowane urządzenie, prosimy o kontakt

### Defibrylator AED-Fred PA-1 Schiller

Defibrylator AED-Fred PA-1 marki Schiller to specjalistyczne urządzenie medyczne przeznaczone do wykonania defibrylacji przy konieczności szybkiej reanimacji osłabionego człowieka. Defibrylator działa przy pomocy impulsu elektrycznego, który przechodząc przez klatkę piersiową, pobudza krążenie, co przyczynia się do pobudzenia pracy serca i powrotu do funkcjonowania organizmu. Stosowany w przypadku nagłego zatrzymania akcji serca, używany między uciskaniem klatki piersiowej, co stanowi pierwszą pomoc, umożliwi ponowną akcję serca już w przypadku 75% zasłabnięć pacjentów. Defibrylator jest przeznaczony do użytku zarówno przez profesjonalnych ratowników medycznych, personel szpitalny, jak i osób, które przypadkowo mogły znaleźć się przy umierającej osobie, a uzyskały wcześniej przeszkolenie z użyciem defibrylatora.

### Ratunek i bezpieczeństwo

Stosowanie defibrylatora AED Fred-PA1 jest w pełni bezpieczne i możliwe do użytku jedynie w przypadku nagłego zatrzymania akcji

serca wymagającego zastosowania defibrylacji. Osoby nieprzeszkolone również mogą udzielić pomocy poprzez urządzenie Novamed, gdyż wbudowany głośnik odczytuje instrukcję obsługi w przypadku nagłej konieczności jego użycia. Dzięki temu, nawet niedoświadczone osoby będą w stanie samodzielnie udzielić pierwszej pomocy. FRED PA-1 jest dostępny jako urządzenie półautomatyczne lub w pełni automatyczne. W wersji półautomatycznej, FRED PA-1 nakazuje ratownikowi dostarczenie wstrząsu poprzez naciśnięcie przycisku wstrząsu. Po uniesieniu pokrywy defibrylator uruchamia się natychmiastowo, co umożliwia szybsze jego zastosowanie. Elektrody są już podłączone i wymagają tylko umieszczenia na klatce piersiowej pacjenta. System wstępnego ładowania umożliwia defibrylację tak szybko jak to będzie konieczne.

**UWAGA: Do defibrylacji dzieci o wadze poniżej 25 kg konieczne są specjalne elektrody do defibrylacji.**

## Charakterystyka produktu

- W zależności od konfiguracji urządzenie występuje w wersji półautomatycznej lub automatycznej (w wersji półautomatycznej nakazuje ratownikowi dostarczenie wstrząsu poprzez naciśnięcie przycisku wstrząsu, w wersji automatycznej urządzenie dostarcza wstrząsy defibrylacyjne automatycznie, tj. wstrząsu nie trzeba wyzwać)
- Prosta obsługa umożliwia zastosowanie urządzenia przez większość użytkowników
- Instrukcja głosowa umożliwia obsłużenie urządzenia przez niedoświadczone osoby postronne
- Interfejs w 3 krokach
- Dołączone do zestawu elektrody są wstępnie podłączone w celu ich szybszego użycia
- Urządzenie samodzielnie informuje o konieczności wymiany elektrod
- Klasa ochronności: IP55
- Zgodny z wymogami normy EN 60601-2-4
- Przechowywanie do 500 zdarzeń lub do 2 godzin danych interwencyjnych (sygnał EKG)
- Przesyłanie danych za pomocą karty SD

## Funkcje defibrylatora

- Asystent uciskania klatki piersiowej:

Metronom

FreeCPR: informacje zwrotne dotyczące częstotliwości uciskania klatki piersiowej

- Proste zarządzanie flotą AED dzięki pulpitowi online dostępnemu na komputerach, tabletach i smartfonach do zdalnej kontroli stanu urządzenia lub materiałów eksploatacyjnych (akumulatora, elektrod).
- Hostowany przez zatwierdzonego dostawcę usług hostingu danych dotyczących zdrowia i medycznych, LifeDataNet G2 to zaawansowany system, który spełnia najwyższe normy bezpieczeństwa (ISO 27001)

### Gwarancja:

72 miesiące gwarancji producenta

### Oznakowanie: CE

### Dodatkowe funkcje:

Instrukcja głosowa w 3 językach

### Zawartość zestawu:

Urządzenie główne, elektrody



Zapytania hurtowe prosimy składać za pośrednictwem danych dostępnych na stronie kontakt

#### Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Zamówienia publiczne oraz zapytania dotyczące produktu, prosimy kierować bezpośrednio do opiekuna



marki: marcin (at) futuremed.co

Podmiot odpowiedzialny:  
SCHILLER Poland Sp.z o.o.  
ul. Rolna 157  
02-729 Warszawa

## Galeria

