

DIATHER TEST ALERGIA pies kot

cena: 42,90 PLN



Opis słownikowy

Kategoria	wyrób medyczny
Producent	DIATHER sp. z o.o sp.k.
Wysyłka	1-2 dni

Opis produktu

TEST ALERGIA pies kot

1 test domowy do wykrywania swoistych przeciwciał klasy IgE swoistych wobec alergenów sierści psa i kota

ZASTOSOWANIE

Alergia jest chorobą występującą w 20-25% przypadków w formie nadwrażliwości typu natychmiastowego z objawami w postaci nieżytu nosa, pokrzywki, atopowego zapalenia skóry, dolegliwości żołądkowo-jelitowych, duszności i rzadziej wstrząsu anafilaktycznego.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

TEST ALERGIA pies kot jest szybkim testem przeznaczonym do jakościowego wykrywania we krwi przeciwciał klasy IgE (sIgE) swoistych wobec alergenów sierści psa i kota. Po uwzględnieniu objawów klinicznych test może służyć do oceny, czy występujące symptomy alergii są spowodowane nadwrażliwością typu 1.

Uzyskany w badaniu wynik testu jest poddany wizualnej interpretacji na podstawie zmiany barwy w polach testowych kasety, które zawierają immobilizowaną streptawidynę. Membrana kasety testowej zawiera przeciwciała sprzężone ze złotem koloidalnym skierowane przeciwko przeciwciałom klasy IgE osoby badanej. Ponadto w studzienkach S kasety testowej zaadsorbowane są biotynylowane alergeny kota i psa.

WSKAZANIA DO WYKONANIA TESTU

TEST ALERGIA pies kot jest przeznaczony dla osób z podejrzeniem alergii (świąd lub zaczerwienienie skóry, powtarzające się łzawienie oczu i kichanie), zwłaszcza jeśli atopia dotyka najbliższej rodziny.

U ponad 20% pacjentów z rozpoznaną alergią występują objawy kliniczne; osoby te narażone są na częste ataki astmy lub inne powikłania.

STRESZCZENIE

Witamina D należy do grupy witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Jest ona odpowiedzialna za prawidłową gospodarkę wapnia i fosforu w organizmie. Witamina D3 jest naturalnie produkowana w ludzkiej skórze w wyniku ekspozycji na światło, a witamina D2 jest pozyskiwana głównie z pożywienia lub suplementacji. Witamina D jest transportowana do wątroby, gdzie jest magazynowana w postaci 25-hydroksywitaminy D - 25(OH)D. Niedobór uznawany jest za częsty problem zdrowotny naszego społeczeństwa, który jest przyczyną wielu poważnych chorób: osteoporozy, chorób nowotworowych, układu krążenia, o podłożu autoimmunologicznym, cukrzycy czy depresji.

OPAKOWANIE ZAWIERA

- 1x kasetka testowa,
- 1x pipeta plastikowa,
- 1x fiolka z zakraplaczem zawierająca bufor o objętości wymaganej do wykonania 1 testu,
- 1x sterylny nakłuwacz do pobieranie próbki krwi
- 1x instrukcja użycia

PYTANIA I ODPOWIEDZI

KTO POWINIEN WYKONAĆ TEST?

TEST ALERGIA pies kot jest przeznaczony dla osób z podejrzeniem alergii (świąd lub zaczerwienienie skóry, powtarzające się łzawieniem oczu i kichanie), zwłaszcza jeśli atopia dotyka najbliższej rodziny.

U ponad 20% pacjentów z rozpoznaną alergią występują objawy kliniczne, osoby te narażone są na częste ataki astmy lub inne powikłania.

CO OZNACZA WYNIK NEGATYWNY?

Wynik negatywny testu oznacza, że stężenie przeciwciał klasy IgE obecnych we krwi jest niższe od stężenia progowego. W przypadku utrzymujących się objawów należy zgłosić się do lekarza.

CO OZNACZA WYNIK POZYTYWNY?

Wynik pozytywny testu oznacza że stężenie przeciwciał klasy IgE obecnych we krwi jest wyższe od stężenia progowego. Należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym, który może zlecić wykonanie innych badań.

JAKA JEST DOKŁADNOŚĆ TESTU?

Dokładność testu (alergeny kota / E1 kot) wynosi 98%.

Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot odpowiedzialny:


DIATHER sp. z o.o sp.k.
Twarda 1/14
00-114 Warszawa

Galeria

Zawartość zestawu



Schemat użycia

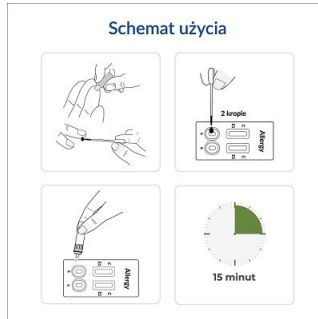

Interpretacja wyników

