

## FEMILA rozszerzacz pochwy z uchwytem 5 sztuk



cena: 239,00 PLN

### Opis słownikowy

Kategoria	wyrób medyczny
Producent	amed
Wysyłka	1-2 dni

### Opis produktu

**FEMILA Silikonowe rozszerzacz pochwy z uchwytem** przeznaczone są do samodzielnych ćwiczeń mających na celu rozszerzenie ścian pochwy, tak, aby stosunek płciowy lub badanie ginekologiczne mogły (ponownie) odbywać się bezboleśnie.

### Zalety:

- 100% wodoodporne
- 5 rozmiarów dostosowanych do potrzeb
- wygodny uchwyt
- hipoalergiczne

### Wskazania do stosowania:

- dyspareunia (nawracający lub stały ból w obrębie narządów płciowych podczas stosunku płciowego; ból podczas seksu)
- pochwica (skurcze mięśni pochwy)
- zbliźnowacenie po nacięciu krocza (epistomia) lub po pęknięciu krocza po operacjach ginekologicznych

w czasie i po radioterapii / chemioterapii

- po operacjach pochwy ze zmniejszeniem pochwy i zbliźnowaceniem
- liszaj twardzinowy i zanikowy sromu
- plastyka pochwy/sztuczna pochwa (np. w przypadku operacji zmiany płci)
- zwężenie pochwy (dziewictwo) opisywane przez pacjentki jako zaburzenie seksualne

**Rozszerzacz pochwy FEMILA to zestaw składający się z 5 dilatorów pochwy (wykonanych**

## z silikonu medycznego), każdy dilator ma inny rozmiar:

nr 1 średnica 13 mm, długość 110 mm  
nr 2 średnica 18 mm, długość 127 mm  
nr 3 średnica 21 mm, długość 145 mm  
nr 4 średnica 25 mm, długość 175 mm  
nr 5 średnica 32 mm, długość 195 mm

## Każdy zestaw zawiera:

5 rozszerzaczy pochwy FEMILA z uchwytem  
szczegółową instrukcję użycia w j. polskim i j. angielskim

## Materiał:

hipoalergiczny silikon

## Skrócona instrukcja użycia:

Przed użyciem należy zwilżyć przedsiónek pochwy i rozszerzacz lubrykantem.

Ćwiczenia rozpoczyna się od wprowadzenia do pochwy najmniejszego rozszerzacza, który pozostawia się w pochwie na kilka minut. Jeśli wprowadzanie rozszerzacza w danym rozmiarze jest możliwe bez bólu, oznacza to, że pochwa rozciągnęła się w takim stopniu, że można użyć o rozmiar większego rozszerzacza.

Ćwiczenia należy wykonywać w pozycji siedzącej lub leżącej w zależności od preferencji pacjentki.

Ćwiczenia rozciągające należy wykonywać codziennie, chyba, że lekarz zaleci inaczej.

Jeśli możliwe jest bezbolesne wprowadzanie największego rozszerzacza, można rozważyć odbycie stosunku płciowego.

## Czyszczenie:

Rozszerzacze pochwy FEMILA są przeznaczone do użycia przez jedną pacjentkę.

Po użyciu należy umyć rozszerzacze ciepłą wodą z łagodnym mydłem oraz osuszyć.

## Produkt posiada ograniczenia w możliwości zwrotu:

Produkt jest wyrobem medycznym, zerwanie zabezpieczeń z opakowania uniemożliwia jego zwrot zgodnie z art. 96 ust. 7 i 8 ustawy – Prawo farm. (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271) **produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, co do zasady, nie podlegają zwrotowi. Wyjątek stanowią produkty lecznicze i wyroby medyczne, które są obciążone wadą jakościową lub zostały niewłaściwie wydane lub sfalszowane.**

## Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## Galeria

