

FERRI-Check - test na niedobór żelaza w krwi

cena: 39,00 PLN



Opis słownikowy

Kategoria	wyrób medyczny
Producent	Lab. Home Poland
Wysyłka	1-3 dni, 24 godziny

Opis produktu

FERRI-Check® - Test na niedobór żelaza (ferrytyna)

Opis produktu

Test FERRI-Check® służy do oceny niedoboru ferrytyny (ferrytyna to białko, które magazynuje żelazo w komórkach). Pozwala to na rozpoznanie niedoboru żelaza (anemia). Szybki test immunodiagnostyczny wykonuje się z próbki krwi pełnej pobranej z nakłucia palca. Test FERRI-Check® jest używany od ponad 10 lat przez profesjonalistów. Test jest dokładny, ma ogólną zgodność na poziomie 98% - w odniesieniu do metody referencyjnej.

Zastosowanie

Anemia (niedokrwistość) spowodowana niedoborem żelaza występuje powszechnie u dzieci i kobiet w każdym wieku - głównie u kobiet miesiączkujących (co najmniej 20% cierpi na niedobór żelaza). Główne objawy, takie jak bladość, uczucie zmęczenia, bóle głowy, szybsze bicie serca lub duszność podczas ćwiczeń, pojawiają się stopniowo i mogą pozostać niezauważone. Niedobór żelaza, który może wystąpić podczas ciąży, w okresie wzrostu, w przypadku niedostatecznego spożycia żelaza, niewystarczającego wchłaniania lub utraty krwi (miesiączki, nieprawidłowe krwawienia, wrzody... itd.) ma ogromny wpływ na zdrowie. Pozytywny (dodatni) wynik testu oznacza, że stężenie ferrytyny w krwi jest poniżej normy i możliwy jest niedobór żelaza.

Sposób użycia

Umyj ręce mydłem, opłucz czystą wodą i osusz. Rozerwij aluminiową torebkę wzdłuż krawędzi, a następnie wyjmij płytkę testową oraz plastikową pipetę. Przygotuj nakłuwacz. Zdezynfekuj opuszek wybranego palca dłoni i pomasuj 10-15 sekund w kierunku opuszka palca, aby zwiększyć ukrwienie. Mocno dociśnij nakłuwacz do bocznej strony zdezynfekowanego opuszka palca i naciśnij przycisk wysuwający lancet. Masuj opuszek palca, aby uzyskać krople krwi. Pobierz krew do pipety. Przenieś pobraną krew do dołka próbkowego płytki. Dodaj 4 krople diluentu (rozcieńczalnika) do dołka próbkowego. Odczytaj wynik testu w okienku wyników po upływie 10 minut.

Ważne wskazówki

Test FERRI-Check nie jest przeznaczony dla pacjentów cierpiących na hemochromatozę. Test można wykonać o każdej porze dnia. Test powinien pozostać w szczelnie zamkniętym opakowaniu do momentu użycia.

Zawartość opakowania

Opakowanie zawiera materiały niezbędne do wykonania badania:

- 1 aluminiowa, szczelna torebka zawierająca

1 płytkę testową, 1 plastikową pipetę oraz 1 saszetkę z pochłaniaczem wilgoci

- 1 butelka z zakraplaczem zawierająca 1 ml diluentu (rozcieńczalnika)
- 1 sterylny lancet (nakłuwacz) do pobierania krwi
- 1 ulotka z instrukcją użytkowania

Producent

VEDA.LAB
Rue de l'Expansion
61000 Cerise, France

Dystrybutor

ZBADAJSIE SP. Z O.O.
ul. Kamila Cypriana Norwida 1/2
48-300 Nysa

Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Galeria

