

FertilSafe Plus Multipack- żel tuba 75 ml + 4 aplikatory



cena: 85,00 PLN

Opis słownikowy

| | |
|-----------|---------------------|
| Kategoria | wyrób medyczny |
| Producent | Babystart Ltd |
| Wysyłka | 1-3 dni, 24 godziny |

Opis produktu

Opakowanie **FertilSafe Plus Multipak** zawiera:

- 1x żel w tubie 75 ml,
- 2x aplikatory wielorazowe,
- 2x aplikatory jednorazowego użytku wypełnione żelem.

FertilSafe Plus stworzony jest specjalnie dla par starających się o dziecko.

Żel ten jest bezpieczny dla plemników. Wspomaga proces zapłodnienia i nie uszkadza ich, dzięki czemu zachowują żywotność i ruchliwość.

FertilSafe Plus naśladuje śluz owulacyjny stanowiąc idealne środowisko dla plemników pomagając w ich transporcie do komórki jajowej, dzięki czemu mogą one swobodnie przemieszczać się, co jest warunkiem zapłodnienia.

FertilSafe PLUS jest przebadany klinicznie w wiodących klinikach andrologicznych w Wielkiej Brytanii. Preparat jest całkowicie bezpieczny i nie wykazuje żadnych działań toksycznych.

FertilSafe PLUS posiada zrównoważone pH. W czasie owulacji pH zmienia się w kierunku zasadowym. Jest to zarazem optymalne pH dla plemników.

FertilSafe Plus posiada pH zgodne z tym, które oznaczane jest u kobiet w czasie owulacji i wynosi pH 7-7,5.

Sposób użycia:

FertilSafe PLUS może być stosowany przed lub w trakcie stosunku. Przeznaczony jest do codziennego użytku. Tuba 75 ml: produkt stosujemy zewnętrznie, wyciskając odpowiednią ilość z tuby na palec i następnie nakładając na kobiece i/lub męskie narządy płciowe.

Jednorazowe aplikatory, wypełnione żelem trzymając węższy koniec aplikatora do góry, należy przekreślić osłonę otworu i wyrzucić ją a następnie powoli wprowadzić węższy koniec aplikatora do pochwy. Można to wykonać w pozycji leżącej, siedzącej lub stojącej. Ścisnąć

końcówkę aplikatora kilkakrotnie, by wypuścić żel do wnętrza pochwy. Kontynuując naciskanie końcówki aplikatora, ostrożnie wyjąć go z pochwy. Po użyciu, należy wyrzucić aplikator.

Aplikator wielorazowego użytku należy wyjąć ze szczelnie zamkniętego woreczka. Odkręcić nasadkę z tuby i rozciągnąć aplikator poprzez wyciągnięcie z tłoku luźnej wstawki. Założyć aplikator na tubkę, umieszczając otwarty koniec na otworze tubki i ostrożnie przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ostrożnie nacisnąć tubkę, do momentu napełnienia aplikatora odpowiednią ilością żelu. Usunąć aplikator z tubki odkręcając przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i założyć nakrętkę na tubę. Ostrożnie wprowadzić aplikator do pochwy. Można to zrobić w pozycji leżącej, siedzącej lub stojącej. Dla równomiernego rozmieszczenia żelu na ścianach pochwy, zalecane jest wprowadzenie do środka niewiele ponad połowy aplikatora. Powoli naciskać końcówkę tłoku aplikatora, w celu rozprowadzenia lubrykantu wewnątrz pochwy. Powoli wyjąć aplikator z pochwy. Przed następnym użyciem, aplikator należy oczyścić i opłukać ciepłą wodą.

Skład:

Aqua, Hydroxyethylcellulose, Phenoxyethanol, Maris Sal, Ethylhexylglycerin, Magnesium Chloride.

FertileSafe Plus nie zawiera parabenów i glikolu.

Ważne wskazówki:

Nie należy przechowywać żelu w aplikatorze wielorazowego użytku przez więcej niż 30 minut przed zastosowaniem. Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej (4-30°C). W przypadku pojawienia się podrażnienia, należy natychmiast zaprzestać stosowania produktu i skonsultować się z lekarzem. Nie należy używać w przypadku jakiegokolwiek infekcji pochwy. W wypadku wcześniejszych zabiegów chirurgicznych w obrębie pochwy, należy skonsultować się z lekarzem, przed użyciem preparatu.

Producent:

Babystart Ltd
Research and Innovation Centre
Finch Close
Nottingham
NG7 2NN
United Kingdom

Dystrybutor:

Medimes Sp. Z o.o.
Bohaterów Września 82
31-620 Kraków

Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.