

Inhalator INFEKCJA STOP



cena: 122,99 PLN

Opis słownikowy

Kategoria	wyrób medyczny
Producent	Albert Polska Sp. z o. o
Wysyłka	2-3 dni

Opis produktu

Inhalator INFEKCJA STOP inhalator przeznaczony jest dla dzieci i dorosłych, oprócz w infekcji może być również używany przy alergii i chorobach układu oddechowego.

Inhalator jest mały i poręczny, dzięki możliwości pracy ciągłej możemy inhalować kolejnych członków rodziny bez konieczności czekania i robienia przerw.

Jest łatwy w użyciu, a dzięki możliwości regulacji prędkości nebulizacji możemy skrócić w razie potrzeby czas podawania leku.

Wskazania:

Szczególnie polecany w leczeniu infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych, może być stosowany do leczenia alergii, przewlekłego nieżyty nosa i gardła, przeziębienia, schorzeń oskrzeli, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), stanów po zapaleniu płuc, nawracającego zapalenia płuc, mukowiscydozy, chronicznego bronchitu, przewlekłego i nawracającego zapalenia oskrzeli oraz stanów pooperacyjnych.

Polecany również do codziennej profilaktyki zdrowych płuc oraz nawilżania i łagodzenia podrażnionego gardła i śluzówki.

Przeznaczony jest do prowadzenia terapii wziewnej w warunkach domowych.

Stosowanie leków zawsze skonsultuj z lekarzem prowadzącym.

Dane techniczne:

Wyrób medyczny klasy IIa

Zużycie energii: 150 VA

Ciśnienie robocze: 0,6 do 1,1 bara

Wymiary: 160 mm dł., 100 mm wys., 160 mm gł.

Waga 1,2 kg

Zawartość opakowania:

Kompresor

Nebulizator z regulacją prędkości nebulizacji

Ustnik
Maski dla dzieci i dorosłych
Długa rurka powietrzna
5 filtrów powietrza

Sposób użycia wyrobu medycznego:

Upewnić się, że filtr powietrza jest zamocowany na urządzeniu, a wyłącznik główny jest ustawiony w pozycji „0”.

Podłączyć urządzenie do gniazdka sieciowego, które zapewnia odpowiednie napięcie i częstotliwość prądu.

Uruchomić urządzenie naciskając przycisk On/Off i ustawić wyłącznik w pozycji „1”.

Upewnić się, że ze zbiorniczka na lek wydobywa się aerozol.

W zależności sposobu używania, przesunąć zawór regulacyjny nebulizacji znajdujący się w pokrywie zbiorniczka w kierunku „+” lub „-”, aby regulować ilość uwalnianego aerozolu w zależności od potrzeb.

Założyć maskę, zasłaniając nią usta i nos. Zapewnić możliwość normalnego oddychania.

Przeciwwskazania i środki ostrożności:

Nie używać produktu u pacjentów nieprzytomnych lub niezdolnych do samodzielnego oddychania.

W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.

W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.

Dystrybutor:

Albert Polska Sp. z o.o.
ul. Obwodowa 4A
32-410 Dobczyce

Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.