

## LIVER-Screen - test na wątrobę

cena: 37,90 PLN



### Opis słownikowy

Kategoria	wyrób medyczny
Producent	Lab. Home Poland
Wysyłka	24 godziny

### Opis produktu

**Test LIVER-Screen** służy do diagnostyki znacznego uszkodzenia wątroby. Test wykrywa w krwi podwyższoną aktywność transaminaz ALT oraz AST. Transaminazy (aminotransferazy) pojawiają się w krwi w zwiększonej ilości w odpowiedzi na uszkodzenie komórek wątroby.

#### W skład zestawu wchodzi:

Profesjonalny nakłuwacz (1szt.), płytko testowa (1szt.), pipeta plastikowa (1szt.), specjalny diluent do rozcieńczenia próbki krwi (1szt.), saszetka pochłaniająca wilgoć (1szt.).

#### Działanie:

W przypadku uszkodzenia komórek wątroby enzymy ALT i AST są uwalniane przez wątrobę do krwiobiegu. LIVER-Screen® wykrywa enzymy dzięki specyficznym odczynnikom immunologicznym. Nieprawidłowe stężenia transaminaz ALT lub/i AST są widoczne jako jedna lub dwie czerwone linie w oknie testowym.

#### Zastosowanie:

Choroby wątroby nawet w 40% przypadków mogą przebiegać bezobjawowo. Uszkodzenie komórek wątroby może być związane z infekcją wirusową, przyjmowaniem leków, chorobami układu krążenia i cukrzycą, niealkoholowym stłuszczeniem wątroby lub chorobą autoimmunologiczną. Z powodu nadużywania alkoholu na marskości wątroby rocznie na świecie umiera 1 mln osób.

#### Objawy chorej wątroby to:

- przewlekłe zmęczenie,
- żółtaczka,
- utrata apetytu,
- ból brzucha,
- ciemny mocz,
- jasne zabarwienie kału,
- obrzmienie brzucha,
- świąd skóry.

#### Ponadto:

- osoby chorujące na cukrzycę lub nadciśnienie tętnicze,
- osoby przyjmujące leki, środki dopingowe, spożywających alkohol,
- osoby narażone na kontakt z krwią i zarażenie wirusami

## Jak odczytać wynik testu?

Testy wątrobowe wynik negatywny:

Wynik negatywny testu oznacza, że stężenie obydwu transaminaz mieści się w przyjętej normie (80 IU/L) – na wyniku badania widoczna jest jedna niebieska linia w polu kontrolnym C

Testy wątrobowe wynik pozytywny:

Wynik pozytywny testu oznacza, że jeden lub dwa poziomy transaminaz (ALT, AST) są wyższe niż przyjęta norma (80 IU/L). Na wyniku badania widoczna jest jedna lub dwie czerwone linie w polu testowym T oraz jedna niebieska linia w polu kontrolnym C. W tym wypadku należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

## Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## Galeria

