

PreFert Vaginal Gel (dawniej Pre-seed) - żel dopochwowy wspomagający poczęcie

cena: 89,97 PLN



Opis słownikowy

Kategoria	wyrób medyczny
Producent	amed
Wsyłka	1-3 dni, 24 godziny

Opis produktu

PreFert zapewnia optymalne środowisko dla plemników

- Nie szkodzi plemnikom ani zarodkom
- Przebadany klinicznie w Niemczech i zalecany przez lekarzy
- Dostosowuje wartość pH do płodnego śluzu szyjki macicy

Jakie korzyści płyną ze stosowania PreFert?

pH między 7.0 a 7.4 (wartość zgodna z pH płodnego śluzu szyjki macicy) zapewnia optymalne warunki dla ruchliwości i przeżywalności plemników,

- zmniejsza barierę osmotyczną wydzieliny pochwy (osmolarność: 260-370mOsm/kg), przez co ułatwia plemnikom dotarcie do szyjki macicy,
- osmolarność i pH PreFert mają te same wartości co sperma. Dzięki temu żel zapobiega odwodnieniu nasienia i tworzy dla niego optymalne środowisko,
- zachowuje ruchliwość plemników w środowisku bardziej niż klasyczne żele nawilżające
- zawartość bioaktywnego arabinogalaktanu wspomaga żywotność i aktywność plemników

Wskazówki dotyczące zewnętrznego zastosowania żelu PreFert®:

Żel PreFert należy stosować w ciągu 3 najbardziej płodnych dni cyklu kobiety (w czasie owulacji). Stosować tylko raz w ciągu 24 godzin.

Żel PreFert należy wprowadzić 5 minut przed współżyciem.

1. Przed współżyciem należy wyjąć jednorazową strzykawkę i aplikator wielokrotnego użytku.
2. Zdjąć ze strzykawki szarą nasadkę.
3. Podłączyć aplikator do strzykawki. Wprowadzić aplikator dopochwowy do pochwy.
4. Nacisnąć tłoczek strzykawki, aby wypchnąć żel do pochwy. Wyjąć strzykawkę z aplikatorem.
5. Wypłukać aplikator i przechować go do następnego użycia żelu.
6. Teraz można rozpocząć współżycie.

OSTRZEŻENIA

- › PreFert® nie jest środkiem antykoncepcyjnym. Nie ma właściwości plemnikobójczych ani nie zakłóca działania plemników.
- › PreFert® jest produktem bardzo śliskim. Należy usunąć wszelkie jego wycieki, niezwłocznie po ich zauważeniu.
- › Jeżeli stosowanie żelu Pre-Seed® powoduje podrażnienie lub dyskomfort, należy zaprzestać używania produktu. Jeśli objawy nie ustępują, należy skontaktować się z lekarzem.
- › Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- › Nie stosować produktu w przypadku występowania czynnego zakażenia lub urazu pochwy. Jeśli pacjentka była niedawno poddana operacji, przed użyciem żelu powinna zasięgnąć porady lekarza.

Składniki: woda oczyszczona, sodu chlorek, sodu fosforan, potasu fosforan, arabinogalaktan, hydroksyetyloceluloza, polyhexanide. Nie zawiera parabenów.

Podmiot odpowiedzialny:

Naturalna Płodność, Chopina 23, lok.305, 62-800 Kalisz

Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.