

## Rotadeno-Screen, Test na rotawirusy

cena: 49,90 PLN



### Opis słownikowy

Kategoria	wyrób medyczny
Producent	Lab. Home Poland
Wysyłka	1-3 dni, 24 godziny

### Opis produktu

**ROTADENO-Screen® jest swoistym, szybkim testem immunodiagnostycznym do wykrywania rotawirusów i adenowirusów w kale - diagnostyka infekcji układu pokarmowego u dzieci i niemowląt.**

#### ROTAWIRUSY ADENOWIRUSY w kale

ROTADENO-Screen® jest swoistym, szybkim testem immunodiagnostycznym do wykrywania rotawirusów i adenowirusów w kale - diagnostyka infekcji układu pokarmowego u dzieci i niemowląt.

#### Wskazania:

Test wykonuje się w przypadku biegunek, bólu brzucha i wymiotów. Zarówno rotawirusy, jak i adenowirusy są główną przyczyną infekcji żołądkowo-jelitowych (oraz powiązanych zespołów) u ludzi, zwłaszcza dzieci i osób starszych. Adenowirus jest związany głównie z infekcyjnym zapaleniem żołądka i jelit, ale także z wieloma innymi chorobami, takimi jak zapalenie gardła, zapalenie oskrzeli (jeśli występuje w drogach oddechowych) lub zapalenie rogówki i spojówek. Infekcja rotawirusowa i adenowirusowa łatwo przenosi się poprzez kontakt z zanieczyszczonymi przedmiotami lub innymi powierzchniami środowiskowymi skażonymi kałem.

#### Skład zestawu:

Opakowanie zawiera materiały niezbędne do wykonania badania:

- 1 aluminiowa, szczelna torebka zawierająca

1 urządzenie testowe oraz 1 saszetkę z pochłaniaczem wilgoci

Test powinien pozostać w szczelnie zamkniętym opakowaniu do momentu użycia.

Nie używaj saszetki z pochłaniaczem wilgoci.

- 1 papierowa podkładka do pobrania próbki kału

- 1 butelka do pobrania próbki kału zawierającą 2 ml diluentu (rozcieńczalnika)
- 1 ulotka z instrukcją użytkowania

#### Sposób użycia:

Odkręć nakrętkę butelki do pobrania próbki i zanurz jej koniec (patyczek) w próbce kału. Włóż ponownie nakrętkę z próbką kału do butelki zawierającej diluent (rozcieńczalnik). Zakręć nakrętkę mocno i dobrze wstrząśnij, aby rozpuścić próbkę kału w rozcieńczalniku. Trzymaj butelkę pionowo i dodaj powoli dokładnie 5 kropli rozcieńczalnika do każdego dołka próbkowego na płytce testowej. Odczytaj wynik testu po upływie 10 minut.

Rotawirusy stanowią od **20 do 80% wszystkich zakażeń** wywołujących biegunki u dzieci i nawracające zachorowania

Infekcja jest możliwa nawet, gdy dziecko jest zaszczepione

**Szczyt zachorowań - wiosna, jesień, zima**

**Główne miejsce transferu - żłobki i przedszkola**

#### Statystyki zakażeń:

200 tys. zachorowań rocznie - według doniesień Państwowego Zakładu Higieny przed 5 rokiem życia każde dziecko przechodzi co najmniej jedną infekcję rotawirusem.

1 dziecko na 5 korzysta z porady lekarskiej

1 dziecko na 65 jest hospitalizowane

1 dziecko na 293 umiera

#### Rekomendacja w przypadku pozytywnego wyniku testu:

Jeżeli wynik jest pozytywny, oznacza to, że w próbce kału obecny jest rotawirus i / lub adenowirus. Powinieneś skonsultować się z lekarzem, aby pokazać mu wyniki testu - zwłaszcza jeśli masz obniżoną odporność lub test wykonywany był u dziecka. Lekarz zdecyduje o podjęciu kolejnych kroków.

#### Producent

VEDA.LAB  
Rue de l'Expansion  
61000 Cerise, France

#### Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## Galeria

