

## Rozszerzacz pochwy, Dilator pochwy Small 3 sztuki



cena: 299,98 PLN

### Opis słownikowy

Kategoria	wyrób medyczny
Producent	amed
Wysyłka	1-2 dni

### Opis produktu

**Rozszerzacz pochwy to zestaw 3 silikonowych rozszerzaczy** (wykonanych z silikonu medycznego) w różnych kolorach. Do każdego koloru przypisany jest inny rozmiar:

- jasnoniebieski - średnica A 12/ B 14 mm, długość C 122 mm
- miętowy - średnica A 16/ B 18 mm, długość C 135 mm
- fioletowy - średnica A 20/ B 22 mm, długość C 150 mm

Dilator służy do samodzielnego i domowego użytku związanego z ćwiczeniami rozciągania ścian pochwy.

#### Wskazania do stosowania:

- dyspareunia (nawracający lub stały ból w obrębie narządów płciowych podczas stosunku płciowego),
- pochwica (skurcze mięśni pochwy),
- zbliznowacenie po nacięciu krocza (epistomia) lub po pęknięciu krocza,
- po operacjach ginekologicznych,
- w czasie i po radioterapii / chemioterapii,
- po operacjach pochwy ze zmniejszeniem pochwy i zbliznowaceniem,
- liszaj twardzinowy i zanikowy sromu,
- plastyka pochwy/sztuczna pochwa (np. w przypadku operacji zmiany płci),
- zwężenie pochwy (dziewictwo) opisywane przez pacjentki jako zaburzenie seksualne.

#### Stosowanie:

Przed użyciem należy zwilżyć przedsiónek pochwy i rozszerzacz lubrykantem, np. Sylk. Rozciąganie pochwy należy rozpocząć od najmniejszego rozszerzacza i wraz ze wzrostem komfortu psychicznego odczuwanego przez kobietę zwiększać rozmiary. Dilatory mogą być używane w pozycji leżącej lub stojącej z jedną nogą uniesioną lub opartą na krześle.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, rozszerzacz należy stosować codziennie.

**Czyszczenie:**

Rozszerzacz są przeznaczone do użycia przez jedną pacjentkę. Po użyciu należy umyć rozszerzacz lub rozszerzacz letnią wodą z łagodnym mydłem.

Należy zapewnić, aby rozszerzacz były suche przed schowaniem ich do torby do przechowywania.

W przypadku infekcji i (lub) w celu oczyszczenia możliwe jest wygotowanie rozszerzaczy we wrzącej wodzie przez 10 minut. Do dezynfekcji można również użyć innych dostępnych na rynku środków do dezynfekcji.

**Podmiot odpowiedzialny:**

AMED,  
ul. Chopina 63,  
62-800 Kalisz.

**Producent:**

Kessel GmbH, Germany

**Ostrzeżenie**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Galeria

