

Starpharma Izotoniczna Woda morska 30 ml spray



cena: 15,94 PLN

Opis słownikowy

Kategoria	wyrób medyczny
Producent	STARPHARMA
Wysyłka	1-3 dni

Opis produktu

Starpharma WODA IZOTONICZNA 30 ml Właściwości nawilża i łagodzi podrażnienia śluzówki nosa w stanach infekcji i alergii przynosi ulgę i ułatwia oddychanie nie zawiera konserwantów Wyrób medyczny IZOTONICZNA WODA MORSKA zawiera wodę morską pozyskaną z głębin Oceanu Atlantyckiego bogatą w naturalne składniki mineralne i pierwiastki śladowe o dobroczynnym działaniu takie jak: jod, cynk, miedź, żelazo, mangan. SKŁAD: 100% izotoniczny roztwór wody morskiej. WSKAZANIA: Produkt jest przeznaczony dla dorosłych, dzieci i niemowląt od 1 miesiąca życia: do codziennej higieny nosa; do nawilżania wysuszonej śluzówki nosa; pomocniczo w czasie nieżyty nosa, zapalenia zatok oraz kataru siennego; łagodząco w czasie podrażnienia śluzówki nosa w stanach infekcji i alergii. SPOSÓB UZYCIA: Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją używania dołączoną do opakowania. Delikatnie wprowadzić końcówkę aplikatora do nosa i nacisnąć podstawę aplikatora. Po każdym stosowaniu oczyścić końcówkę wodą z mydłem, a następnie opłukać i osuszyć. Niemowlęta od 1 miesiąca życia i dzieci: stosować 1 do 2 dawek sprayu do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy dziennie; Dorośli: 1 do 3 dawek sprayu do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy dziennie. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: W celu uniknięcia przeniesienia infekcji, zalecane jest używanie jednego wyrobu przez jedną osobę. Nie stosować preparatu w przypadku stwierdzenia nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu. Nie stosować po upływie terminu przydatności do użycia. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 5-25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. PRZECHOWYWAC W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI. NIE STOSOWAĆ U WCZEŚNIAKÓW. ODPOWIEDNI DLA KOBIEC W CIĄŻY.

Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot odpowiedzialny:

Starpharma Sp. z o.o.
ul. Stawki 2, 23 piętro
00-193 Warszawa

