

# StickOff, spray usuwający opatrunki samoprzylepne bez bólu, 50 ml



cena: 39,90 PLN

## Opis słownikowy

Kategoria	wyrób medyczny
Producent	Smart Pharma Sp. z o.o
Wysyłka	24 godziny

## Opis produktu

**Spray StickOff** ułatwiający usuwanie opatrunków samoprzylepnych. Jest przeznaczony dla każdego niezależnie od wieku, również dla kobiet w ciąży. Sprawdzi się przede wszystkim przy zmianie opatrunków o dużej sile klejenia, taśm kinesiotapingowych, plastrów przeciwbólowych, hormonalnych czy antynikotynowych. Nie wysusza skóry, może być stosowany pod różnym kątem co ułatwia zastosowanie w trudnodostępnych miejscach i na zagięciach.

### Składniki:

Disiloksan

### Sposób użycia:

Nanieść preparat na przyklejony plaster lub przylepiec. Odczekać kilka sekund, aż powierzchnia plastra będzie wilgotna i delikatnie go usunąć. W zależności od potrzeb, w przypadku mocno przyklejonego plastra powtórzyć aplikację preparatu. W przypadku plastrów wodoodpornych odkleić róg plastra i nanieść preparat między plaster a skórę. U noworodków i w okolicach oczu nanieść niewielką ilość preparatu do nasadki zabezpieczającej, zamoczyć patyczek higieniczny i nanieść preparat na opatrunek. Preparat bardzo szybko wysycha, nie utrudniając przyklejania kolejnego plastra/przylepca. Może być stosowany również do usuwania ze skóry starych pozostałości kleju.

### Przeciwwskazania:

Nie stosować u osób uczulonych na składnik preparatu.  
Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.  
Przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego.  
Unikać kontaktu z oczami.  
Stosować w miarę potrzeb.  
Produkt skrajnie łatwopalny. Pojemnik pod ciśnieniem.  
Nie przekłuwać ani nie spalać.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego okna.  
Chronić przed dziećmi.  
Chronić przed światłem słonecznym.

**Producent**

Smart Pharma Sp. z o.o.  
Złotniki, Kobaltowa 6  
Suchy las

**Ostrzeżenie**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.