


TEST CIĄŻOWY SUPERCZUŁY płytkowy, 1 szt

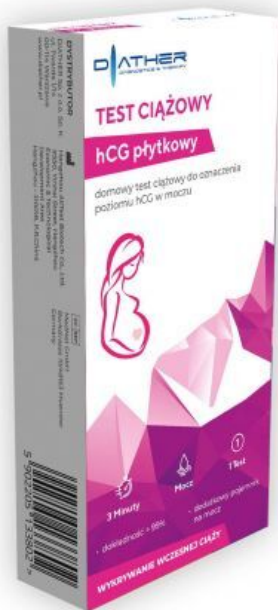

cena: 4,50 PLN

Opis słownikowy

Kategoria	wyrób medyczny
Producent	DIATHER sp. z o.o sp.k.
Wysyłka	do 24 godzin

Opis produktu

TEST CIĄŻOWY

Nr kat.: FHC-102H

TEST CIĄŻOWY (1 test) domowy, kasetkowy test ciążowy do wykrywania poziomu hCG w moczu.

ZASTOSOWANIE

Test jest przeznaczony do oznaczenia poziomu hormonu hCG w moczu nawet w niewielkich ilościach. Czułość testu wynosi 25 mIU/ml, dzięki czemu wykrywany jest hormon przy niskich stężeniach. Badanie jest bardzo proste w wykonaniu, a wynik odczytuje się po 3 minutach.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Test ciążowy płytkowy jest przeznaczony do wykrycia obecności hormonu hCG w moczu kobiety w celu potwierdzenia lub wykluczenia zapłodnienia komórki jajowej (potwierdzenie lub wykluczenie ciąży). Test można wykonywać o każdej porze dnia, jednakże najwyższe stężenie hormonu odnotowuje się w moczu porannym oddanym po przebudzeniu. Badanie jest proste oraz szybkie w wykonaniu.

Oczekiwanie na wynik trwa jedynie 3 minuty.

WSKAZANIA DO WYKONYWANIA TESTU

- spóźniająca się miesiączka
- współżycie bez zabezpieczenia

STRZESZCZENIE

Podczas owulacji (jajeczkowania) dochodzi do uwolnienia z jajnika dojrzałej, gotowej do zapłodnienia komórki jajowej, która dostaje się do jajowodu, gdzie może zostać zapłodniona, jeśli w ciągu 24 godzin dojdzie do spotkania z nasieniem mężczyzny. Wkrótce po zapłodnieniu, komórki rozwijającego się łożyska wytwarzają hormon hCG (ludzka gonadotropina kosmówkowa). TEST CIĄŻOWY wykrywa w moczu nawet niewielkie ilości hormonu hCG, co pozwala potwierdzić lub wykluczyć ciążę. Test jest wyjątkowo czuły i pozwala wykryć hormon hCG przy stężeniu 25 mIU/ml. Wykonanie badania polega na dodaniu na płytkę testową 3 kropli moczu i odczytaniu w ciągu 3 minut wyniku badania.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1 saszetka z testem kasetkowym
1 pipeta
1 pojemnik na mocz
instrukcja obsługi

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. JAK DZIAŁA TEST CIĄŻOWY ?

Za pomocą testu określany jest poziom hormonu hCG w moczu. Poziom hormonu wzrasta po zapłodnieniu dojrzałej komórki jajowej.

2. JAK CZUŁY JEST TEST CIĄŻOWY ?

Test wykrywa hormon gonadotropinę kosmówkową (hCG) o stężeniu 25 mIU/ml i powyżej.

3. JAK WIARYGODNY JEST TEST?

Wiarygodność testu wynosi ponad 99% i odpowiada wiarygodności testu laboratoryjnego. Przeprowadzono również ocenę kliniczną, porównując wyniki uzyskane przy użyciu TESTU CIĄŻOWEGO z innym komercyjnym dostępnym na rynku testem hCG w moczu. Badanie kliniczne obejmowało 608 próbek moczu: oba testy wykazały 231 wyników pozytywnych i 377 wyników negatywnych. Na podstawie wyników stwierdzono ponad 99% dokładność TESTU CIĄŻOWEGO w porównaniu z innym testem hCG w moczu. Ponadto wykazano, że na wynik TESTU CIĄŻOWEGO nie wpływa obecność innych hormonów w moczu: hormonu LH (do 300 mIU/ml), FSH (do 1000 mIU/ml) czy TSH (do 1000 µIU/ml).

4. KIEDY NALEŻY WYKONAĆ TEST?

Test należy wykonać w pierwszym dniu spodziewanej miesiączki, można go wykonać o każdej porze dnia; największe stężenie hormonu gonadotropiny kosmówkowej (hCG) zawarte jest w moczu porannym.

5. DLACZEGO ZALECA SIĘ WYKONANIE TESTU Z PIERWSZEGO PORANNEGO MOCZU?

Badanie można przeprowadzić o każdej porze, jednak pierwszy poranny mocz zawiera najwyższe stężenie gonadotropiny kosmówkowej (hCG).

6. SKĄD WIADOMO, ŻE TEST ZOSTAŁ WYKONANY PRAWIDŁOWO?

Obecność barwnej linii w polu kontrolnym C testu świadczy o prawidłowo wykonanej procedurze i zastosowaniu odpowiedniej wielkości próbki.

7. CO NALEŻY ZROBIĆ JEŻELI WYNIK TESTU JEST NEGATYWNY?

Negatywny wynik testu oznacza, że hormon hCG nie został wykryty i prawdopodobnie nie ma ciąży. Jeżeli miesiączka nie pojawi się w ciągu kilku dni, należy powtórzyć test. Możliwe, że źle wyliczono dzień rozpoczęcia miesiączki.

8. CO NALEŻY ZROBIĆ JEŚLI WYNIK TESTU JEST POZYTYWNY?

Pozytywny wynik testu oznacza, że hormon hCG został wykryty w moczu i prawdopodobna jest ciąża. Ciążą może być potwierdzona jedynie przez lekarza, który udzieli dalszych wskazówek.

Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot odpowiedzialny:

DIATHER sp. z o.o sp.k.
Twarda 1/14
00-114 Warszawa