

# TEST INFIEKCJE INTYMNE panelowy, Diather, 1 szt

cena: 14,90 PLN

## Opis słownikowy

Kategoria	wyrób medyczny
Producent	DIATHER sp. z o.o sp.k.
Wysyłka	1-2 dni



## Opis produktu

Prawidłowe pH ujścia pochwy jest kwaśne. To naturalna bariera przeciw wnikaniu drobnoustrojów do naszego organizmu. W momencie zaburzenia fizjologicznego odczynu prawdopodobieństwo infekcji intymnych wzrasta. Wskazaniem do wykonania testu jest obecność takich objawów jak świąd w miejscach intymnych, upławy, ból i zaczerwienienie sromu czy dyskomfort podczas stosunku płciowego.

**TEST INFIEKCJE INTYMNE** to szybki, wartościowy test, który przeprowadzisz sama w domu. Da pogląd na charakter problemów intymnych z jakimi się borykasz.

### OPAKOWANIE ZAWIERA

- 1 saszetka z testem panelowym
- 1 wymazówka do pobrania próbki
- instrukcja użycia

### PYTANIA I ODPOWIEDZI

#### 1. JAKI JEST PRAWIDŁOWY POZIOM pH POCHWY?

Prawidłowy poziom pH mieści się w zakresie od 3,8 do 4,4. Poziom powyżej 4,4 może przyczyniać się do powstania infekcji intymnych i różnych na tym tle dolegliwości.

#### 2. KIEDY ZASTOSOWAĆ TEST?

Zaleca się zastosowanie testu w sytuacjach gdy wystąpią objawy takie jak: pieczenie, swędzenie, charakterystyczne upławy czy wydzielina. Warto przeprowadzić test po antybiotykoterapii, podczas ciąży, w trakcie stosowania hormonalnej terapii zastępczej w okresie okołomenopauzalnym czy profilaktycznie jako badanie kontrolne.

#### 3. KIEDY WYKONAĆ TEST?

Test można wykonać o dowolnej porze, jednak istnieją pewne ograniczenia, których nieprzestrzeganie wpływa na wiarygodność wyniku. Zaleca się zapoznanie z treścią rozdziału ŚROKI OSTROŻNOŚCI w niniejszej instrukcji.

#### 4. KIEDY NIEPRAWIDŁOWY ZAKRES WYNIKU NIE ŚWIADCZY O INFEKCJI INTYMNEJ?

U niektórych kobiet w okresie menopauzy obserwuje się podwyższenie pH pochwy. Uzyskany wynik testu będzie świadczył o zakresie nieprawidłowym, niespowodowanym infekcją intymną

#### 5. CO WPŁYWA NA BŁĘDNY WYNIK?

Uzyskane wyniki testu są zależne od przestrzegania wytycznych zawartych w instrukcji użycia. W przypadku, gdy panel testowy ulegnie zamoczeniu lub zastosowano niewłaściwą procedurę badania, wynik badania może być nieprawidłowy. Wyniki zaleca się skonsultować z lekarzem prowadzącym.

#### 6. JAKIE SĄ OBJAWY INFEKCJI POCHWY

Infekcje intymne charakteryzują się swoistymi objawami takimi jak świąd w okolicach pochwy, zaczerwienienie pochwy i sromu, charakterystyczne upławy, bolesność i pieczenie sromu, specyficzny zapach oraz ból podczas stosunku.

## Ostrzeżenie


To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### Podmiot odpowiedzialny:

DIATHER sp. z o.o sp.k.  
Twarda 1/14  
00-114 Warszawa

## Galeria

Schemat użycia

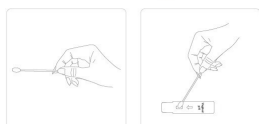

Interpretacja wyników



Zawartość zestawu

