

# TEST MENOPAUZA płytkowy Diather, 2 sztuki

cena: 15,50 PLN



## Opis słownikowy

Kategoria	Sprzęt medyczny
Producent	DIATHER sp. z o.o sp.k.
Wysyłka	1-3 dni, 24 godziny

## Opis produktu

Menopauza dotyka kobiet między 45 a 55 rokiem życia. Często zwiastunem nadchodzących zmian są uderzenia gorąca, wahania nastrojów, poty, uczucie zmęczenia. W ciele kobiety wtedy zachodzi szereg zmian hormonalnych, do których najważniejsze to zwiększenie wydzielania FSH i LH a spadek wydzielania progesteronu i estrogenów.

Określenie poziomu hormonu FSH jest pomocne przy diagnozowaniu okresu przekwitania. **TEST MENOPAUZA** jest szybkim testem wykrywającym w moczu hormon FSH o stężeniu 25 mIU/ml lub wyższym. Wykonanie badania jest bardzo proste i polega na wprowadzeniu do okienka na płytce testowej 3 kropli moczu i odczytaniu w ciągu 3 minut wyniku badania.

### OPAKOWANIE ZAWIERA

- 2 saszetki z testem kasetkowym
- instrukcja użycia

### PYTANIA I ODPOWIEDZI

#### 1. NA CZYM POLEGA DZIAŁANIE TESTU MENOPAUZA?

Menopauza najczęściej występuje pomiędzy 45 a 55 rokiem życia kobiety. W tym czasie produkcja estrogenów i progesteronu spada, a wzrasta poziom hormonów LH i FSH. Zasada działania testu oparta jest na oznaczaniu podwyższonego poziomu hormonu FSH w moczu kobiety w okresie perimenopauzalnym. **TEST MENOPAUZA** jest szybkim testem płytkowym do jakościowego wykrywania w moczu hormonu FSH o stężeniu 25 mIU/ml lub wyższym. Zasada działania testu opiera się na swoistej reakcji immunochemicznej antygen-przeciwciała. Naniesione w procesie produkcji na pasek testowy przeciwciała anty-FSH reagują z hormonem FSH obecnym w moczu.

#### 2. CZY MOŻNA MIEĆ PEWNOŚĆ, ŻE ZA POMOCĄ TESTU MENOPAUZA UZYSKA SIĘ WIARYGODNE WYNIKI?

Pojawienie się linii kontrolnej C w płytce testowej daje pewność, że test działa prawidłowo i badanie zostało przeprowadzone zgodnie z instrukcją. Jeśli linia kontrolna C nie pojawi się, to należy powtórzyć badanie. W tym celu należy użyć nowy test, ponieważ każdy szybki test jest przeznaczony tylko do jedнокrotnego użycia.

#### 3. CZY STOSOWANE PRODUKTY LECZNICZE I INNE ŚRODKI MEDYCZNE MAJĄ WPŁYW NA WYNIK TESTU?

Nie, nie mają wpływu. Jeśli jednak przyjmowane są jakiegokolwiek preparaty hormonalne, to należy to skonsultować się z lekarzem. Stosowanie doustnej antykoncepcji hormonalnej, karmienie piersią i ciąża mogą mieć wpływ na wynik testu.

#### 4. CZY MOŻNA PRZRZERWAĆ ANTYKONCEPCJĘ HORMONALNĄ PRZY DODATNIM WYNIKU TESTU?

Nie, ponieważ test nie służy do określania dni płodnych. Antykoncepcję należy stosować tak długo, dopóki dodatni wynik testu na menopauzę nie zostanie potwierdzony przez lekarza prowadzącego.

#### 5. JAK CZUŁY JEST TEST MENOPAUZA?

Za pomocą testu wykrywa się w moczu hormon FSH o stężeniu 25 mIU/ml lub wyższym.

#### 6. JAK DOKŁADNY JEST TEST MENOPAUZA?

Z przeprowadzonych badań klinicznych wynika, że dokładność testu wynosi 100%. Badaniem objęto 250 próbek moczu (85 pozytywnych i 165 negatywnych). Wykazano, że na wynik testu nie wpływa również obecność innych hormonów w moczu: hormon LH (do 1000 mIU/ml), hCG (do 100 IU/ml) i TSH (do 1000  $\mu$ IU/ml).

#### 7. CZY ALKOHOL MA WPŁYW NA WYNIK TESTU?

Nie. Stosowanie doustnej antykoncepcji hormonalnej, karmienie piersią i ciąża mogą mieć wpływ na wynik testu.

## Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### Podmiot odpowiedzialny:

DIATHER sp. z o.o sp.k.  
Twarda 1/14  
00-114 Warszawa

## Galeria

Schemat użycia



Zawartość zestawu



Interpretacja wyników

