

VITAMMY mask SB BLACK / opak. 50 szt. Maska medyczna , jednorazowa 3-warstwowa na gumki



cena: 1,90 PLN

Opis słownikowy

Producent	VITAMMY
Wysyłka	24 godzin

Opis produktu

Profesjonalna medyczna maska jednorazowa 3-warstwowa na twarz z gumkami na uszy typu II EN14683

VITAMMY[®] mask



medyczna maska jednorazowa 3-warstwowa
medical disposable 3-ply face mask
masque médical 3 plis jetable



Przeznaczenie: jednorazowa maska medyczna służy do zakrywania ust, nosa i szczęki użytkownika w zwykłym środowisku medycznym, blokując usta i jamę nosową użytkownika przed wydychaniem lub rozpylaniem zanieczyszczeń.

Efektywna i komfortowa, z elementem uszczelniającym i dopasowującym do nosa.

Maska zgodna z następującymi standardami:

EN 14683:2019

BFE > 98%

Czystość mikrobiologiczna (CFU) ≤ 30 cfu/g

Różnica ciśnień (DP) < 40 Pa / cm²

Ostrzeżenia

1. Sprawdź kompletność opakowania przed użyciem. Sprawdź etykietę, datę produkcji i czas ważności, aby upewnić się, że produkt jest ważny.
2. Nie używaj, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
3. Nie używaj ponownie. Ponowne użycie może spowodować zakażenia krzyżowe.
4. Nie stosować w inwazyjnym środowisku medycznym lub środowisku zawierającym szkodliwe gazy / pyły;
5. Nie używaj tego produktu w pobliżu źródeł ognia. Po użyciu należy go zutylizować.
6. Maksymalny ciągły czas użytkowania tego produktu nie może przekraczać 4 godzin.
7. W przypadku objawów alergicznych, takich jak swędzenie i ból ucha, należy przestać używać tego produktu.
8. Jeśli nos, usta lub ucho noszą obrażenia na powierzchni skóry, która będzie wchodzić w kontakt z tym produktem podczas użycia, należy je najpierw wyleczyć.

Instrukcja użytkowania:

1. Otwórz torebkę i wyjmij maskę.

2. Rozłóż maskę, aby uniknąć dotykania wnętrza maski dłońmi kolorową stroną skierowaną od siebie.
3. Ustaw krawędź z elastycznym paskiem na górze. Zawieś pętle na uszach.
4. Naciśnij pasek, aby dopasować maskę do grzbietu nosa, następnie przytrzymaj pasek na nosie i pociągnij dolny koniec maski do dolnej szczęki.
5. Dopasuj maskę, aby zakryła twarz, od grzbietu nosa do dolnej szczęki w celu uzyskania jak najlepszego efektu ochronnego.
6. Nie dotykaj zewnętrznej strony maski podczas jej zdejmowania.
7. Utylizacja musi odbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów medycznych.

Przechowywanie: Należy przechowywać w wolnym od gazów, czystym, chłodnym, suchym i wentylowanym pomieszczeniu.

Okres ważności: 2 lata

- SKU: TOW018210
- Kod EAN: 5901793645735
- Grupa produktów: Maski chirurgiczne
- Stawka podatku: VAT 8%

Galeria

